

Materialise Dental - Progetto Scansione Ottica: procedure

Cosa fa il dottore

Cosa deve avere:

- un caso a supporto dentale o misto mucoso dentale
- il modello di gesso del paziente relativo al caso che vuole pianificare
- Sp Planner o Sp Pro installato
- essersi registrato sul sito dell'Ambulatorio Exel www.radiologiadentale.it
- non aver ancora spedito on line l'ordine a Materialise Dental Belgio

Passo 1. Far ritirare il modello di gesso del paziente da Riform

In presenza di un caso a supporto dentale o misto, il dottore deve mettersi in contatto con Riform perché vengano a ritirare il modello di gesso. Può attivare il servizio anche prima di aver pianificato.

Le informazioni da inserire insieme al modello di gesso

- **nome del dottore** a cui verrà fatturato l'ordine
- **nome del/della paziente**
- **arcata (mandibola o mascella)**

Importante

in questa fase non avremo un numero d'ordine per cui è fondamentale inserire tutte le informazioni necessarie per riconoscere il modello di gesso.

Importante

a) **il progetto Siplant inviato ad Exel può essere con o senza pianificazione va bene lo stesso**, Exel si occuperà di sovrapporre il modello di gesso digitale (in pratica apparirà una maschera in più)

b) **gli utenti Planner che già normalmente si servono da Exel potranno ovviamente inviare i dicom per la segmentazione e nello stesso tempo attivare il servizio optical scan**. Riceveranno il progetto Siplant Planner segmentato con l'aggiunta della maschera del modello di gesso.

Passo 2. Inviare il progetto Siplant all'Ambulatorio Exel

Contestualmente il dottore va sul sito dell'Ambulatorio Exel, www.radiologiadentale.it inserisce le sue credenziali di accesso e carica il proprio progetto Siplant.

L'Ambulatorio Exel, dopo aver fatto la sovrapposizione di modello di gesso, consegna il progetto Siplant completo di tutto al dottore **attraverso un link via mail**.

Il dottore scarica il progetto, lo rivede, pianifica in caso non lo abbia già fatto e spedisce l'ordine come di consueto.

Passo 3. Non resta che spedire l'ordine on line!

Cosa fa Riform s.r.l.

- Viene contattata dal dottore
- invia un corriere DHL a prendere il modello di gesso
- scansiona il modello in file STL
- rispedisce il modello di gesso al dottore
- invia i file STL a EXEL

Contatti Riform

Tel. 0245475940
Email: info@riform.eu

Cosa fa EXEL s.r.l.

- Riceve progetto Siplant del dottore (se sono file DICOM segmenta e crea il file di progetto)
- Riceve file STL
- mette insieme le progetto e file STL
- Invia una mail al dottore con un link da cui il dottore può scaricarsi il file di progetto con la scansione ottica (oppure il dottore scarica direttamente dal sito www.radiologiadentale.it il proprio progetto).

Contatti Exel

Ivan Pagnini
Marco Invernizzi
Tel. 0392727861
Email: info@radiologiadentale.it